

QUICK START GUIDE deutsch

Für den perfekten Start.



www.miyoworld.eu



VORBEREITUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE



Vorbereitung

- Vor dem Auftragen der Massen muss die Oberfläche sauber und fettfrei sein.
- Oberfläche mit dem Sandstrahler 50 µm und 2 bar Druck säubern (Hinweise im Workbook S. 19 beachten).

Verarbeitung

- Überschüssige Flüssigkeit **nicht** aus den Behältern gießen.
- MiYO Color, MiYO Structure und Glasurpaste vor jeder Anwendung gut mit einem metallfreien Spatel durchmischen.
- Die Pasten dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Immer einen sauberen und trockenen Pinsel verwenden.


Anwendung

- Auftragen der Massen auf die vorbereitete Oberfläche gemäß ihrer Bestimmung.

Lagerung

- Trocken bei +12°C bis +38°C lagern.

**VOR JEDER ANWENDUNG MIT
EINEM METALLFREIEN SPATEL
GUT AUFRÜHREN.**

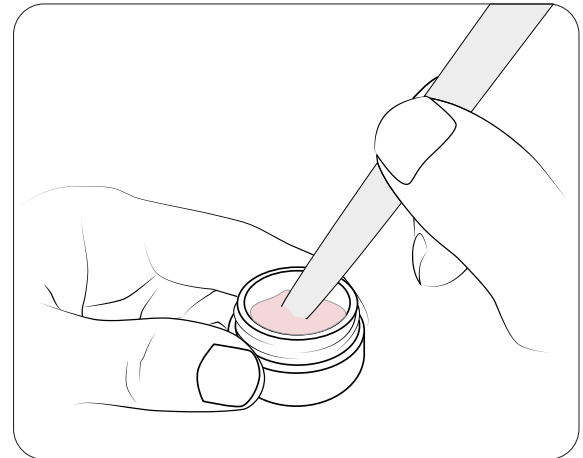

BRENTABELLEN & BRENNKURVEN



Brennparameter*	COLOR STRUCTURE GLAZE PASTE BRAND			
	ZrO ₂	InSync Zr	Lithium-Disilikat	Press to Zirkon
Starttemperatur [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
Trockenzeit [min]	3	3	3	3
Schließzeit [min]	4	4	4	4
Heizrate 1 und 2 [°C/min]	45	45	45	45
Haltezeit 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
Vakuum Start [°C]	580	580	580	580
Endtemperatur [°C]	720	720	710	720
Vakuum Ende [°C]	720	720	710	720
Haltezeit 2 [s] **	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Öffnungszeit [min]	1	1	1	1

* Die Brenntemperaturen sind Richtwerte und können je nach Ofentyp und Größe (Volumen) der Restauration variieren.

** Je nach gewünschtem Glanzgrad sollte die Haltezeit 30 - 60 Sekunden betragen.

HT STRUCTURE BRAND	
ZrO ₂	InSync Zr
400 - 450	400 - 450
3	3
4	4
45	45
30 - 45	30 - 45
600	600
775	775
775	775
60	60
1	1

Mehr Informationen
im Kundenportal:





www.miyoworld.eu/login/kundenlogin



Brennkurven

Anpassung verschiedener Brennparameter, entsprechend der Größe der Restauration,
Details siehe Workbook S.17. **Beachten: Verzögerter Vakuumstart!**

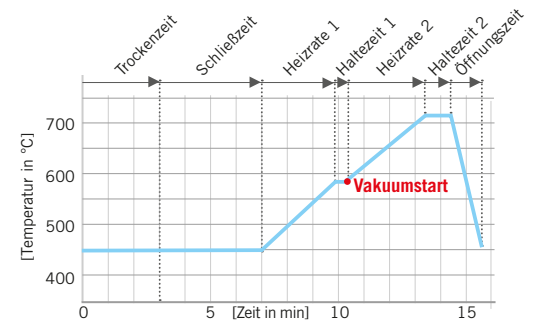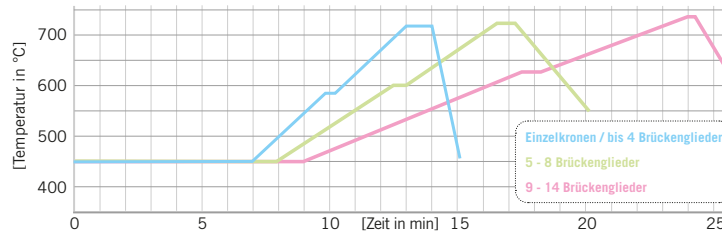

TRAINING & SUPPORT



Registrierung für das Kundenportal

Im Kundenportal stellen wir Ihnen exklusives Schulungs- und Informationsmaterial zur Verfügung. Lernen Sie anhand der Trainingsvideos den sicheren Umgang mit MiYO und MiYO pink. Brennanleitungen und Hinweise zur Ofenprogrammierung helfen Ihnen bei der Programmierung Ihres Brennofens.

Registrierung: www.miyoworld.eu/login/registrierung

Zur Registrierung benötigen Sie die MiYO Kitnummer, diese finden Sie auf der Rückseite dieses Quick Start Guides und im MiYO Kit unter dem Liquid.



Individuelle MiYO Onlineschulung

Mit dem Kauf eines Kit erhalten Sie einen **Gutschein für eine individuelle MiYO.face to face Schulung**. Wir erläutern Ihnen das Liquid Ceramic System im Detail und zeigen Ihnen wie Sie eine Krone und Gingiva gestalten können. Tipps zur Brandführung und Ofenprogrammierung runden die Schulung ab. Auf Wunsch kann das Training aufgezeichnet werden.

Terminvereinbarung:

E-Mail: training@jensendental.de

Telefon: 0800 857 3230 / +49 (0) 7123 92260



Tutorials - 30 Minuten MiYO Update

Sie arbeiten schon mit MiYO und möchten mehr über die Gestaltung der Oberflächentextur mit den Strukturmassen, Blankauswahl oder das Einstellen des Helligkeitswerts erfahren? Dann nehmen Sie an einem der kostenlosen MiYO Tutorials teil.

Neu: Tutorial zur Gestaltung von VITA® 3D Master Zahnfarben mit MiYO.

Anmeldung:

www.miyoworld.eu/training/online-angebote



Workbook ...

Alle Dokumente rund um MiYO, MiYO pink und die Glasurpasten stehen für Sie zum Download auf unserer Website bereit.

www.miyoworld.eu/downloads



Support

Haben Sie Fragen zu MiYO? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir sind für Sie da - am Telefon, per E-Mail oder im LiveChat auf www.miyoworld.eu

E-Mail: info@jensendental.de














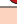










Telefon: 0800 857 3230 / +49 (0) 7123 92260

www.miyoworld.eu/kontakt



PREISLISTEN & BESTELLINFORMATIONEN














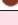



MiYO

Artikel		Art.nr.	Preis €
TRANSLUCENT 4g			
Trans Shade A		0877	43,00
Trans Shade B		0878	
Trans Shade C		0879	
Trans Shade D		0880	
Trans Straw Fluor		0862	
Trans Sage Fluor		0893	
Trans Lotus Fluor		0861	
Trans Clementine Fluor		0863	
Trans Storm Fluor		0860	
Trans Cobalt Fluor		0894	
Trans Smoke Fluor		0875	
Trans Slate Fluor		0895	
Trans Lumin Fluor		0876	
Trans Lumin Plus Fluor		0896	
Trans Sunflower Fluor		0950	
Trans Garnet		0952	
MAMELON 4g			
Mamelon Wheat Fluor		0866	43,00
Mamelon Coral Fluor		0867	
Mamelon Pumpkin Fluor		0868	
HALO 4g			
Halo Spring Fluor		0864	43,00
Halo Autumn Fluor		0865	
COLOR 4g			
Snow Fluor		0857	43,00
Linen Fluor		0858	
Fissure Fluor (Pulver)		0859	

Artikel		Art.nr.	Preis €
STRUCTURE 4g			
Structure Window Fluor		0869	48,00
Structure Ghost Fluor		0873	
Structure Enamel Fluor		0872	
Structure Ice Fluor		0870	
Structure Blush Fluor		0871	
HT STRUCTURE 4g			
HT Structure Enamel Fl.		0953	48,00
HT Structure Window Fl.		0954	
GLASURPASTE 4g			
InSync Glaze Paste Fluor		0819	39,00
STAIN / GLAZE LIQUID INSYNC one-for-all			
Stain / Glaze Liquid 25ml		0800/25	11,60
Stain / Glaze Liquid 50ml		0800/50	23,00
MIYO Kit			
18 x MiYO Color 5 x MiYO Structure 1 Glaze Paste 1 Stain / Glaze Liquid 25 ml		0881- MiYO Kit	990,00
MIYO Kit Color+			
22 x MiYO Color 2 x MiYO Structure 1 Glaze Paste 1 Stain / Glaze Liquid 25 ml		0881- MiYO Kit Color+	990,00

Die Preisliste ist gültig ab 01.04.2021.
Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Jensen GmbH.

**MiYO
pink**

Artikel		Art.nr.	Preis €
TRANSLUCENT 4g			
Trans Raspberry		0887	43,00
Trans Copper		0888	
Trans Midnight		0883	
Trans Carnation		0951	
Trans Garnet		0952	
COLOR 4g			
Flamingo		0881	43,00
Crimson		0882	
Plum		0884	
Merlot		0885	
Sorbet		0886	
Salmon		0889	
Sable		0897	
Thistle		0898	
Venule (Pulver)		0957	
STRUCTURE 4g			
Structure Orchid		0890	48,00
Structure Rouge		0891	
Structure Frost		0892	
GLASURPASTE 4g			
MiYO Glaze Paste No Fluor		0821	39,00
STAIN / GLAZE LIQUID INSYNC one-for-all			
Stain / Glaze Liquid 25ml		0800/25	11,60
Stain / Glaze Liquid 50ml		0800/50	23,00
MiYO pink Kit			
11 x MiYO pink Color 3 x MiYO pink Structure 1 MiYO Glaze Paste No Fluor 1 Stain/Glaze Liquid 25 ml		0881- MiYO pink	599,00



Registrierung für das Kundenportal

Als MiYO Kunde haben Sie exklusiven Zugang zum Kundenportal.
Bitte registrieren Sie sich dazu auf www.miyoworld.eu unter **LOGIN > REGISTRIERUNG**
Zur Anmeldung benötigen Sie die MiYO Kitnummer.

MiYO Kitnummer



www.miyoworld.eu/login/registrierung

Hergestellt von:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com



Vertrieb und Technischer Support Europa:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany

Telefon 0800-857 32 30
info@jensendental.de
www.miyoworld.eu
www.jensendental.de

... more MiYO

